



بِسْمِ تَعَالَى
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

چک لیست طرز کار عملی با دستگاه لیزر درمانی کم توان قلب

بخش:

نام و نام خانوادگی:

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	از اتصال دستگاه لیزر به برق اصلی اطمینان حاصل می کند.			
۲	جهت روشن کردن دستگاه کلید را روی on قرار می دهد.			
۳	بر حسب پروتکل لیزر درمانی Time و Power را ست می کند.			
۴	فیبرهای نوری را در محل مناسب قرار می دهد.			
۵	عینک مخصوص لیزر را برای بیمار می گذارد.			
۶	به صورت لمسی کلید Start را می زند.			
۷	در پایان لیزر درمانی بعد از صدای بوق، دکمه Stop را می زند.			
۸	فیبرهای نوری را از بدن بیمار جدا کرده و در قسمت مربوطه دستگاه می گذارد.			
۹	دستگاه را خاموش می کند.			

۰ = خیر

۱ = تا حدودی

۲ = بلی

نمره	درصد
۱۸	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور:
- نام و نام خانوادگی سرپرستان:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر:

امضاء:

امضاء:

امضاء: