

بسمه تعالی
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

چک لیست طرز کار عملی با دستگاه استریلایزر پلاسما

نام و نام خانوادگی : بخش :

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	برق ورودی دستگاه را چک می کند.			
۲	تست آمادگی دستگاه را انجام می دهد (self test) .			
۳	آشنایی با نوع سیکل های دستگاه دارد.			
۴	نوع سیکل را متناسب با حجم وسایل انتخاب می کند.			
۵	وسایل را به طور صحیح در سبد دستگاه می چیند .			
۶	با مراحل کار دستگاه آشنایی دارد.			
۷	کارتریج H2O2 را به طور صحیح جاگذاری می کند.			
۸	مراحل استریلیزاسیون را تا پایان کنترل می کند.			
۹	با نوع خطاهای دستگاه آشنایی دارد.			
۱۰	در صورت بروز خطا در دستگاه طریقه رفع خطا را می داند.			
۱۱	بعد از اتمام کارکارتریج استفاده شده را با دستکش مخصوص از دستگاه خارج می نماید.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۲۲	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستان: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: