

چک لیست طرز کار عملی با دستگاه پرفیوزر

نام و نام خانوادگی : بخش :

ردیف	عنوان	۲	۱	۰
۱	از متصل بودن دستگاه به برق یا داشتن شارژ برای مدت مشخص مطمئن است.			
۲	داروی مورد نظر را در سرنگ مناسب کشیده است.			
۳	سرنگ را به ست یا اسکالپ متصل کرده است.			
۴	کلمپ سرنگ پمپ را به سمت بالا برده و ۹۰ درجه چرخانده است.			
۵	از ثابت ماندن سرنگ در مکان خود مطمئن است.			
۶	جهت روشن کردن پمپ دکمه on را به مدت یک ثانیه فشار می دهد.			
۷	توسط دکمه Flow Rate سرعت تزریق را مشخص می کند.			
۸	جهت حذف هوا از ست همزمان دکمه Reset / Rapo را می فشارد.			
۹	جهت شروع تزریق از دکمه start استفاده می کند.			
۱۰	جهت تزریق فشاری حجم کلی از دارو همزمان دکمه MI/ Rapo را می فشارد.			
۱۱	از دکمه stop جهت متوقف کردن تزریق استفاده می کند.			
۱۲	آلارم Near empty (محلول در حال اتمام است) را می داند.			
۱۳	آلارم End (تزریق کامل شده است) را می داند.			
۱۴	بعد از اتمام دارو کلمپ پمپ را به سمت پائین فشرده و سرنگ را جدا می کند.			
۱۵	از دکمه off جهت خاموش کردن دستگاه استفاده می کند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

درصد	نمره
۱۰۰	۳۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: