



بسمه تعالی
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

چک لیست طرز کار عملی با دستگاه کوتر (Valley labforce 2)

نام و نام خانوادگی : بخش :

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	اطراف و زیر بدن بیمار خشک است.			
۲	اطراف و زیر بدن بیمار با قسمتهای فلزی تخت در تماس نیست.			
۳	دستگاه را با دکمه on روشن می کند.			
۴	دستگاه را با فشار دکمه Ready از حالت stand by خارج می کند.			
۵	بسته به نیاز، دکمه mono polar یا Bipolar را فشار می دهد.			
۶	با دکمه های coal power و cut power و لتاژ دستگاه را در محل mono polar تنظیم می نماید.			
۷	اگر از قسمت cut دستگاه هم استفاده شود mode آنرا انتخاب می کند.			
۸	پلیت را در ناحیه مناسب روی بدن بیمار می چسباند.			
۹	ناحیه اتصال پلیت روی بدن بیمار اگر عرق کرده خشک می کند.			
۱۰	از خاموش بودن چراغ قرمز با علامت پلیت مطمئن می شود.			
۱۱	سیم قلم کوتر را در محل مناسب mono polar یا Bipolar نصب می کند.			
۱۲	در صورت استفاده از foot Swich کابل آنرا در محل مخصوص روی دستگاه نصب می کند.			
۱۳	هنگام استفاده از دستگاه در صورت شنیدن صدای آلام، از نحوه اتصال درست پلیت به بدن و خشک بودن ناحیه و همچنین سالم بودن رابط پلیت اطمینان حاصل می کند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۲۶	۱۰۰

نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:

• نام و نام خانوادگی سرپرستار: امضاء:

• نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: