

چک لیست استفاده از نبولایزر

نام و نام خانوادگی : بخش:

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	دستگاه را روشن می کند.			
۲	دارو و آب را داخل مخزن به میزان لازم می ریزد.			
۳	از فیکس بودن مخزن در جای خود مطمئن می گردد.			
۴	لوله تنفسی را به یک سر نبولایزر وصل کرده و از سوی دیگر به بیمار هدایت می کند.			
۵	میزان خروج دارو را تنظیم می کند.			
۶	مدت زمان استفاده از دستگاه را تنظیم می کند.			
۷	در پایان دستگاه را خاموش کرده و از تمیز شدن آن برای بیمار دیگر اطمینان حاصل می کند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۱۴	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: